

## **Tipps und Pflege zum Download**

### **Wartung**

Das Zentralprofil nimmt die Verriegelungselemente für das Standbein vorne und Standbein hinten auf. Das Zentralprofil und die Verriegelungselemente sind in regelmäßigen Intervallen zu schmieren. ( Schmiermittel Fin Super + Teflon Fa. Interflon )

### **Desinfektion und Reinigung**

Die Desinfektion des Fahrgestell erfolgt nach den gesetzlichen Vorschriften des jeweiligen Landes. Es sind Flächendesinfektionsmittel zu verwenden. Z.B. ( Henkel – Ecolad Deutschland GmbH, Tarralin Liquid, Perform 250 Schülke & Mayr GmbH ).Die zu verwendenden Desinfektionsmittel Sollen für die Anwender der BRD grundsätzlich aus der DGHM - Liste Auswählt werden ( Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie).

### **Reinigung**

In jedem Land muß die Grundreinigung für Krankentragen bzw. Fahrgestelle egenfalls nach den dort gültigen Vorschriften erfolgen. Als Grunreinigungsmittel kann z.B. Fin Clean All Konzentrat Fa. Interflon und als Nachreinigungsmittel SPARKLE Fa. Chemsearch NCH GmbH verwendet werden.