



**STOLLENWERK**

Gemeinsam retten. Seit 1919.



CE



## GURTSYSTEM

# 6001/6003

### Wasch-, Desinfektions- und Bedienungsanleitung

Dieses Infoblatt soll die Montage des Gurtsystems (6001-160) und dessen Reinigung erleichtern. Hinweise zum korrekten Anlegen des Gurtsystems entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung ihres Tragestuhls.




1



2

Zum Abnehmen der Gurte zunächst die Gurte unten ausklinken (Bild 1 – Übersicht Pos. 7) und dann oben durch die Schlaufen ziehen. Hierzu an den roten Bändern in der Gurtdurchführung ziehen (2).

## Komponentenübersicht:

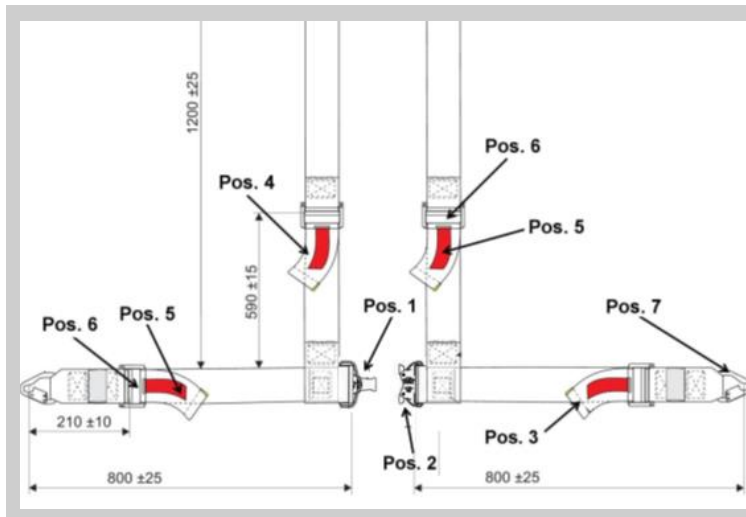

Pos. 1: Gurtzunge

Pos. 2: Gurtschloss

Pos. 3: Längenverstellung Beckengurt

Pos. 4: Längenverstellung Schultergurt

Pos. 5: Längenverstellung Öffnungslasche

Pos. 6: Gurtverstellungselement

Pos. 7: Ausklinkbeschlag

## Serviceinformationen

Tel: +49 221 968 403 0 oder [info@stollenwerk-koeln.de](mailto:info@stollenwerk-koeln.de)

Für Reparaturanfragen oder Ersatzteilbestellungen senden Sie uns gerne vor Ihrem Anruf ein Bild/Video unter Angabe Ihrer Kundennummer an unsere:

WhatsApp-Servicenummer: +49 151 510 30 500\*

\*unter dieser Nummer können keine Anrufe entgegengenommen werden




## Reinigung und Desinfektion

### Reinigung

In jedem Land muss die Grundreinigung für Rettungsequipment ebenfalls nach den dort gültigen Vorschriften erfolgen. Als Grundreinigungsmittel können zum Beispiel zu den Desinfektionsmitteln passende Reinigungsadditive eingesetzt werden.



Die Gurte können durch Waschen in kaltem bzw. lauwarmen Wasser gereinigt werden. Beim Waschen in der Waschmaschine ist die Verwendung eines gepolsterten Wäschebeutels (Art. Nr. 6001-00.04) empfohlen. Beim Waschen bei 95° ist mit einer einmaligen Gurtbandverkürzung um bis zu 4% zu rechnen. Beim Waschen bei 60° ist mit einer einmaligen Gurtbandverkürzung um bis zu 2% zu rechnen. Diese Behandlung hat aber keine Einflüsse auf die Festigkeit des Systems.

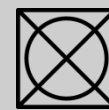

### Desinfektion

Die Desinfektion muss nach den gesetzlichen Vorschriften des jeweiligen Landes erfolgen. Es ist Flächen-desinfektionsmittel aus der RKI-Liste zu verwenden und entsprechende Schutzkleidung zu tragen. Die Anwendungshinweise der Hersteller sind stets zu berücksichtigen. Die Präparate der untenstehenden Liste sind bereits bei uns erfasst und können für die Desinfektion verwendet werden:

Hersteller	Präparat
Lysoform	Aldasan® 1%
Schülke	Terralin® Liquid
Schülke	Perform 250
Henkel Ecolab	Incidur VD 12
Bode Chemie Hamburg	Mikrobac extra

**[Jegliche Art der Desinfizierung von STOLLENWERK Produkten mit Wasserstoffperoxid oder Desinfektionsmitteln basierend auf Halogenen ist dringlichst nicht zu empfehlen!]**

Das Gurtsystem kann abgenommen und separat tauchdesinfiziert werden. Nach intensivem Kontakt der Gurte mit Desinfektionsmittel ist nach Ablauf der Einwirkzeit ein Ausspülen mit Wasser sinnvoll, um Verhärtung sowie Versprödung und somit frühzeitige Alterung vorzubeugen.



### HINWEIS !

- Testen Sie das Desinfektions- bzw. Reinigungsmittel erst an einer nicht sichtbaren Stelle.
- Keine abrasiven Reinigungsmittel verwenden.
- Verwendungshinweise der Präparate beachten!
- Keine Hochdruckreiniger verwenden!
- Keine Trocknung im Trockner durchführen.

STOLLENWERK - Fabrik für Sanitätsausrüstungen [www.stollenwerk-koeln.de](http://www.stollenwerk-koeln.de)

STOLLENWERK u. Cie. GmbH

Waltherstraße 76  
51069 Köln



Telefon (0221) 96 84 03 -0  
Fax-Nr. (0221) 96 84 03 -23

Email: [info@stollenwerk-koeln.de](mailto:info@stollenwerk-koeln.de)  
[www.stollenwerk-koeln.de](http://www.stollenwerk-koeln.de)

WhatsApp-Service Nummer: +49 151 510 30 500\*

\*unter dieser Nummer können keine Anrufe entgegengenommen werden