

**POLSTERPRODUKTE****3300,3315
&3325****Desinfektionsmittelhinweise**

[Jegliche Art der Desinfizierung von STOLLENWERK Produkten mit Wasserstoffperoxid oder Desinfektionsmitteln basierend auf Halogenen ist dringlichst nicht zu empfehlen!]

Folgende Desinfektionsmittel können verwendet werden:

ANIOS, Anios D.D.S.H.	CosiMed GmbH, CosiMed 7,5 %
ANIOS, SURFANIOS Premium	Dr. Schumacher, Optisept 7 %
Antiseptica, Acrylan	Dr. Schumacher, Cleanisept Wipes
Aquagenius Schweiz GmbH, ASCEA-des	Dr. Schumacher, Cleanisept 2 %
B. Braun Melsungen AG, Helipur	Dr. Schumacher, Biguanid Fläche
B. Braun Melsungen AG, Meliseptol foam	Dürr Dental GmbH & Co. KG, FD 300 1%
B. Braun Melsungen AG, Hexaquart plus lemon fresh	Dürr Dental GmbH & Co. KG, FD 312
B. Braun Melsungen AG, Hexaquart forte 2 %	Dürr Dental GmbH & Co. KG, FD 366
B. Braun Melsungen AG, Hexaquart S 1,5 %	Dürr Dental GmbH & Co. KG, FD 360 unverdünnt
B. Braun Melsungen AG, Melsept SF 0,5 %	Franken Chemie GmbH & Co. KG, Franko-Cid N 0,25 %
Bode Chemie, Dismozon Pur	Franken Chemie GmbH & Co. KG, Dessan 2 0,25 %
Bode Chemie, Microbac Forte	Metasys, Green & clean SK start
Bode Chemie, Microbac Tissues	Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Lysoformin spezial
Bode Chemie, Bacillocid Spezial	
Bode Chemie, Kohrsolin extra	
Bode Chemie, Kohrsolin FF	

Sollten Desinfektionsmittel verwendet werden, welche nicht in der Liste aufgeführt sind, so sind diese für eine Materialbeständigkeit an einer nicht sichtbaren Stelle zu testen. Ein Nachspülen mit Wasser ist empfohlen um einer vorzeitigen Materialalterung vorzubeugen.

Serviceinformationen

Tel: +49 221 968 403 0 oder info@stollenwerk-koeln.de

Für Reparaturanfragen oder Ersatzteilbestellungen senden Sie uns gerne vor Ihrem Anruf ein Bild/Video unter Angabe Ihrer Kundennummer an unsere:

WhatsApp-Servicenummer: +49 151 510 30 500*

*unter dieser Nummer können keine Anrufe entgegengenommen werden